



### Cure-oreilles spirale & 16 embouts interchangeables - Récupération facile et rapide du cérumen

Nettoie les oreilles et enlève facilement le cérumen en un tour, grâce à ses embouts en spirale

Se place directement dans l'oreille. Son bout pointu, souple et flexible, empêche d'aller trop loin dans le conduit auditif. Les spirales sur l'embout permettent de mieux accrocher le cérumen et offre une rapidité d'utilisation.

- Facile et rapide d'utilisation
- Récupère le cérumen et ne le pousse pas vers le fond du conduit auditif
- Poignée ergonomique pour une bonne prise en main
- 16 embouts souples jetables compris

#### Compris dans le pack :

- 1 poignée
- 16 embouts souples jetables
- Casier de rangement

#### Mode d'emploi :

##### Utilisation

1/ Insérer soigneusement et doucement l'embout dans l'oreille. Ne pas trop forcer l'embout dans le conduit auditif.

2/ Tourner dans le sens de la flèche (vers l'avant pour l'oreille droite, vers l'arrière pour l'oreille gauche).

Retrait de l'embout : Appuyer sur les deux côtés de la pointe et pousser vers l'avant pour que l'embout soit libéré

##### Remplacement de l'embout :

1/ Aligner les fentes de la pointe avec les rainures de la poignée

2/ Appuyer fermement pour verrouiller ensemble

#### Dimensions :

Manche : 12,5 x 1,5 cm

Embouts : 3 x 1,5 cm

#### Attention

Il est important d'utiliser ce produit sur des oreilles saines.

Ce produit est en aucun cas fait pour retirer un bouchon d'oreille durci. Si vous êtes dans cette situation, nous vous conseillons de prendre directement rendez-vous avec votre médecin et d'utiliser un spray auriculaire permettant le ramollissement.

Ne doit pas être utilisé sur des oreilles comportant des lésions, des infections ou des maladies.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*